

# 禄米病理取材台操作使用流程

## 一. 操作流程

- 1.察看电源线是否有裸露情况，插上电源。
- 2.合上电源，打开仪器电源开关到“ON”。
- 3.检查仪器按键是否灵敏。
- 4.检查设备排风、照明、供水是否正常，。
- 5.操作人员带好口罩，手套操作。
- 6.使用结束后，关闭排风、照明，断开电源。

## 二. 使用注意事项：

- 1.发现电源线有裸露情况时，必须停止使用，并通知设备科相关人员到场察看。
- 2.排风、照明有异常情况是，请立即停用设备，并通知设备科技术人员到场察看。
- 3.排气时，应拉下活动门，确保安全使用原则。
- 4.使用中不慎滴落或翻倒液体，应立即擦拭干净，以免长时间侵蚀损坏排风柜。
- 5.使用中，应该注意实验条件变动（如失电、断水、操作时间等），并于实验前做好防范措施。
- 6.每周清洁消毒病理取材台一次。

